


INDICATION	AAA de plus de 50mm, ou anévrisme sacciforme ou anévrisme à croissance rapide > 10mm/an
CRITERES	Collet de 15mm a parois parallèles ou conique de différentiel de pas plus de 3mm sur la longueur du collet. Angulation thrombus et calcifications modérées
EXCLUSION	(Cf IFU) Angulations et tortuosités excessives, Calcifications, thrombus, conicité du collet, accès incompatibles avec le dispositif
ABORD	Artériel bi-fémoral
STANDARD	Corps bifurqué ZIMB + 2 jambages : ZISL
CONCURRENCE	MEDTRONIC: Endurant II(s) similaire Alpha mais plus compliqués à poser. IFU Collet 10mm GORE: C3 Très Souple. Excellente image, précise mais plus compliquée à poser avec système C3. Intros en sus TERUMO AORTIC : Anaconda repositionnable, jambages souples et aimant pour cathétérisme du moignon
COMPLEMENT	Extension proximale ZLBE XX-YY Convertisseur Endovasculaire ZLC XX-66
NOTES	PROCEDURES COMPLEMENTAIRES : Embolisation iliaques internes ou AMI par coils. Angioplastie bilatérale (Kissing Ballon) si bifurcation aortique étroite Dilatateurs JCD /JCDS si accès étroits Récupération de guide par cross-over si cathétérisme impossible : INDY

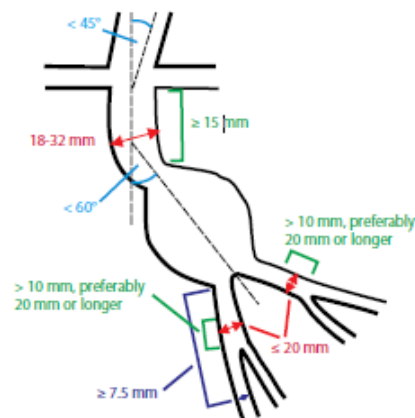

	PRODUIT	RPN
ACCEDER	intro court (check flow)	RCFN-6.0-35-J (x2)
	Guide Hydrophile	HWAS-35-180
	Catheter angio globale	HN4/5.0-35-70-P-10S-PIG
	Guide Lunderquist	TSMG-35-260-LES (x2)
	Ou Guide Lunderquist courbure en J de 7 cm	TSCMG-35-260-7-LES (x2)
	Corps d'endoprothèse	ZIMB-XX-YYY (LPP3150711)
	Sonde pour cathétérisme moignon C2	HNB-5.0-35-65-P-NS-C2
TRAITER	Sonde pour cathétérisme moignon KMP	HNB-5.0-38-40-P-NS-KMP
	Cathéter gradué	N5.0-35-100-P-10S-PIG-CSC-20
	Jambage	ZISL-XX-YYY (LPP 3136384)
	Ballon coda	Coda2-9.0-35-120-32
	+/- Extension proximale	ZLBE-XX-YY (LPP 3129881)
	+/- Convertisseur endovasculaire	ZLC-XX-YY (LPP 3184934)
	Kit de Pose	ZAPP-A ou ESSK 3/ESSK AAA