

**INDICATION** Anévrisme de l'aorte thoracique descendante de plus de 60mm ou ulcère pénétrant

**CRITERES** Collet > 20mm a parois parallèles ou conique de différentiel de pas plus de 3mm sur la longueur du collet. Angulation thrombus et calcifications modérées

**EXCLUSION** (Cf IFU) : ruptures isthmiques (BTAI) et anévrismes disséquants. Angulations et tortuosités excessives, calcifications, thrombus, conicité du collet, Accès

**ABORD** Artériel fémoral

**STANDARD** Corps proximal +/- Corps distal


**CONCURRENCE** **COOK** : Gamme étendue CMD , meilleur profil du marché, intro Flexor, anti bec-oiseau

**METRONIC** : Valiant la plus proche mais stent proximal plus agressif, moins profilée que l'Alpha

**GORE** : C-Tag Très Souple. Conformable mais pas de précision de placement, toutes indications

**TERUMO AORTIC** : Bolton Relay intros OD 22-26mm possibilité CMD, toutes indications

**NOTES** **PROCEDURE COMPLEMENTAIRE** : Dilatateurs JCD /JCDS si accès étroits  
Récupération de guide par va et vient téléphérique avec HWAS 300

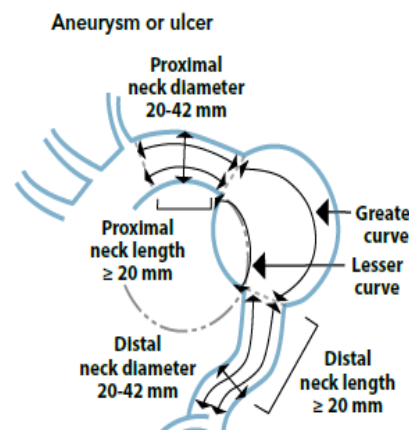

PRODUIT		RPN
ACCEDER	Intro court (check flow)	RCFN-6.0-35-J (x2)
	Guide Hydrophile	HWAS-35-260
	Catheter gradué angio globale	N5.0-35-100-P-10S-PIG-CSC-20
	Guide Lunderquist double courbure	TSCMG-35-260/300-LESDC
	Ou guide Lunderquist double courbure (étroite)	TSCMG-35-260/300-E-LESDC
	Corps d'endoprothèse cylindrique proximal	ZTA-P-XX-YYY (LPP 3121046)
	Corps d'endoprothèse dégressif proximal	ZTA-P-XX-YYY (LPP 3165345)
TRAITER	Corps d'endoprothèse cylindrique distal	ZTA-D-XX-YYY (LPP 3173735)
	Extension distale	ZTA-DE-XX-YYY (LPP 3122637)
	Ballon coda	Coda2-10.0-35-140-46
	KIT DE POSE	ZAPP-T