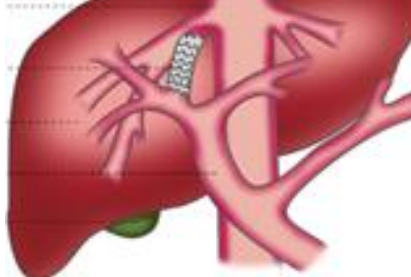


INDICATIONS	Ascite réfractaire, hémorragies digestives (rupture varice oesophagienne ou gastrique) résistantes au traitement médical et endoscopique		
OBJECTIF	Mise en place d'un stent semi-couvert entre la veine sus-hépatique et la veine porte pour dérivation du sang		
ABORD	Veineux Jugulaire Trans hépatique		
SYMPTOMES	Cirrhose → Hypertension portale → Ascite et hémorragies digestives		
TRAJET	Jugulaire int droite → veine cave supérieure → VCI → veine sus hépatique droite		
FOIE	Le sang arrive au foie de l'artère hépatique et de la veine porte (réunion de la veine mésentérique supérieure, de la veine mésentérique inférieure, et de la veine splénique). Il repart par les veines sus-hépatiques.		
TECHNIQUE	<p>PONCTION VASCULAIRE écho guidée veine jugulaire interne droite. Introducteur 9FR</p> <p>PONCTION INTR HEPATIQUE à l'aide d'une aiguille courbe avancée à travers le parenchyme hépatique de la veine sus-hépatique droite (à 2 cm de l'ostium) jusqu'à la veine porte droite (au plus près de la bifurcation). On aspire au moyen de l'aiguille jusqu'à obtenir du sang.</p> <p>MESURE des pressions portales (par le cathéter à ballonnet) et cave (par le désilet jugulaire) pour évaluer le gradient de pression intra-hépatique.</p> <p>DILATATION sur guide du trajet parenchymateux avec cathéters à ballonnet 8 et 10 mm / 4 cm et guide Amplatz. Mise en place endoprothèse.</p> <p>Le geste peut être complété par l'embolisation des varices gastriques, oesophagiennes</p>		
CONCURRENCE	Gore a un stent dédié VIATORR® : partie couverte 5 à 8 cm dans le parenchyme hépatique et partie nue dans la veine porte et également un kit de pose (TIPS Set)		
NOTES	TIPSS = Transjugular Intrahepatic PortoSystemic Shunt		

PRODUIT	RPN
Aiguille	SDN-18-7.0-U
Guide hydrophile Uniglide	HPWA-35-...
SET TIPSS :	TIPSS-100
. Aiguille Rosch-Uchida	RUPS-100
. Tube connecteur	DPT9.5-30-P-FM
. Robinet 3 voies	PTWSC-2FLL-SMLL-R-HP
. Dilateur 8 Fr	JCD8.0-35-20
. Dilateur 10 Fr	JCD10.0-38-20
. Guide dédié	TCMTNA-35-145-3
. Cathéter courbure TIPS	HNB5.0-35-65-P-NS-TIPS
. Amplatz Ultra Stiff	THSCF-35-180-3-AUS1
. Robinet 1 voie	POWS-FLL-MLL